



SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

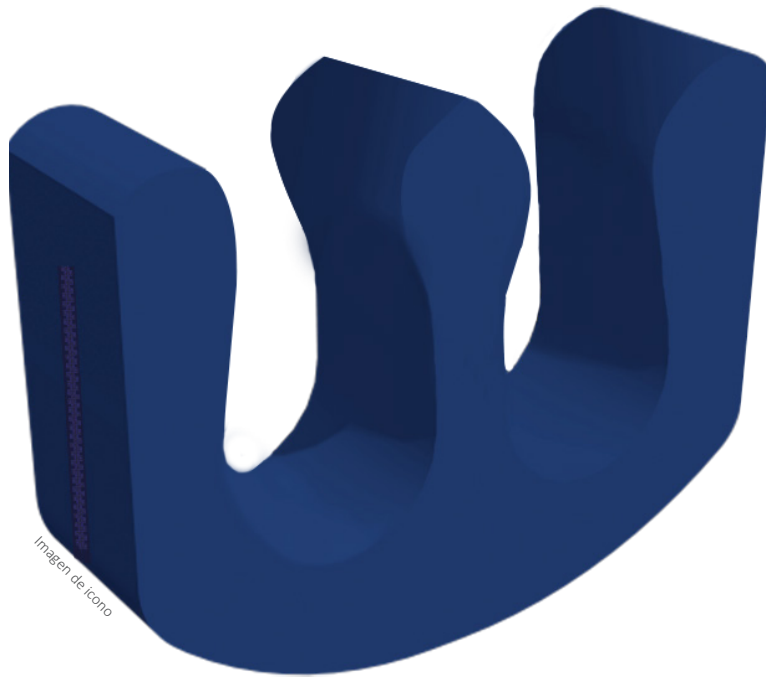


Imagen de ícono

MobiTurn®

AYUDA DE GIRO Y POSICIONAMIENTO
PARA PACIENTES INMÓVILES

Presentado por:



VITALVIA SL
Novia Salcedo 16, 4º dcha
48930 Las Arenas Getxo, Vizcaya
España - Spain

Tel: +34 94 640 9893
Tel Mov: +34 649927982

email: info@vitalvia.es
www.vitalvia.es



Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Ayuda a prevenir lesiones de
espalda a personal asistencial

Funda desinfectable
fácilmente

MobiTurn®

Ayuda de giro y posicionamiento
para pacientes inmóviles

2 AÑOS DE
GARANTÍA

*2

Funda-PU:

- Extraíble
- Lavable hasta a 95°C
- Desinfectable
- Resistente a desinfectantes*3
- Apto para la desinfección con cloro*3
- Esterilizable en autoclave

Costuras selladas
con ultrasonido

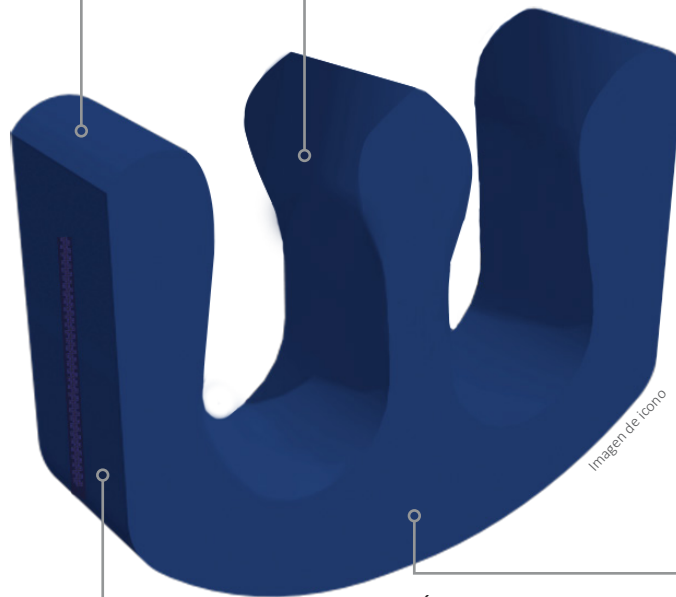


Imagen de Icono

Núcleo: Espuma PU

Ámbitos de aplicación:

- Su forma ergonómica garantiza un posicionamiento correcto del paciente
- Permite un tratamiento seguro y sin dolor al rotar a los pacientes
- Previene lesiones de espalda y optimiza tiempos para el personal de enfermería y los familiares – cuidadores



*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales (a prorrata)!

*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.



Con el dispositivo de posicionamiento y giro MobiTurn® las personas atendidas pueden girarse de forma segura e indolora de la posición supina a la posición lateral en la cama. La transferencia por parte del cuidador se simplifica y permite un trabajo respetuoso con la espalda y que ahorra energía.



1.

La persona cuidada se tumba en la cama en decúbito supino. Asegúrese de que la persona cuidada no esté demasiado cerca del borde de la cama hacia la que se va a girar. Así se evita que la persona se caiga al girarla.



2.

El cuidador levanta las piernas de la persona atendida y coloca el MobiTurn® plano bajo las piernas.



3.

Las piernas de la persona cuidada deben colocarse rectas en los huecos de la ayuda para posicionamiento/giro MobiTurn®.



4.

En el siguiente paso el MobiTurn® se endereza y debe quedar a la altura de las rodillas de la persona a la que se va a cuidar.





5. Ahora la persona que va a ser atendida está preparada para el giro. El brazo opuesto a la dirección de colocación deseada se coloca sobre el abdomen de la persona a la que se va a cuidar. El otro brazo, que está en el lado de la cama, se coloca hacia arriba en un ángulo de 90°.



6. El cuidador colocará una mano en el MobiTurn® y la otra en el hombro de la persona que se va a girar a la posición lateral con la mayor suavidad posible.



7. El paciente se encuentra ahora en decúbito lateral y debe ser estabilizado. A continuación, se puede retirar la ayuda de posicionamiento/giro MobiTurn®.

Si el paciente necesita ser tratado en posición lateral durante un breve periodo de tiempo, el MobiTurn® no se retira hasta que el paciente haya vuelto a la posición supina después del tratamiento.



8. Para volver a colocar al paciente en decúbito supino, el cuidador coloca una mano en el MobiTurn® en el hueco de la rodilla y la otra mano en el hombro del paciente y lo vuelve a colocar boca arriba.

Para retirar la MobiTurn®, se inclina hacia el extremo de la cama hasta que quede plana sobre el colchón. Se levantan las piernas de la persona atendida y la MobiTurn® puede retirarse fácilmente.