

Invacare Eslingas



Óptima comodidad y ajuste



La gama de eslingas

Brinda un ajuste óptimo

Nuestra gama de eslingas han sido diseñadas para facilitar transferencias seguras y cómodas para los usuarios. La gama incluye varios modelos, tallas y material para asegurar que la eslinga se ajusta perfectamente a cada usuario, tanto si tienen alguna incapacidad o requieren un completo soporte corporal.

Nuestro equipo de expertos y terapeutas ocupacionales han dedicado tiempo para asegurarse de que las eslingas sean intuitivas y fáciles de manipular por el cuidador.

La gama de eslingas consiste en nueve modelos, con diferentes tallas y materiales para elegir.

La amplia gama de eslingas asegura que exista una eslinga adecuada para todos los usuarios y cada situación: tranferencias diarias de la cama a una silla de ruedas/sofá, una transferencia de limpieza o incluso para un baño o ducha.



4

CARACTERÍSTICAS CLAVES



◀ Ajuste óptimo

- ▶ La eslinga correcta para cada usuario y tipo de transferencia.
- ▶ Increíble oferta de 9 modelos, en diferentes tallas y 4 tipos de material.
- ▶ Patrones bien definidos para brindar soporte en las partes del cuerpo adecuadas.
- ▶ Todas las eslingas tienen diferentes cintas de posición para mayor compatibilidad de perchas.

Seguridad y confianza mejoradas ▶

- ▶ Videos de utilización de fácil acceso mediante códigos QR
- ▶ Etiquetas claras con ilustraciones intuitivas de la colocación de las eslingas.
- ▶ Material ignífugo certificado y respetuoso del ambiente para el modelo de las Eslingas Comfort In Situ.



◀ Comodidad óptima

- ▶ Material suave para incrementar la comodidad
- ▶ Las secciones de la espalda y piernas están acolchadas para una distribución óptima del peso.
- ▶ Extra-acolchado en la zona sensible de las axilas.

Fácil aplicación ▶

- ▶ Bolsillo de posicionamiento, que ayuda a deslizar la eslinga en la espalda del usuario cuando está sentado.
- ▶ Dos marcas de posicionamiento que permiten alinear la eslinga a la columna.
- ▶ Cintas de posición de colores que ayudan de forma visual a seleccionar la posición de la eslinga en la percha.

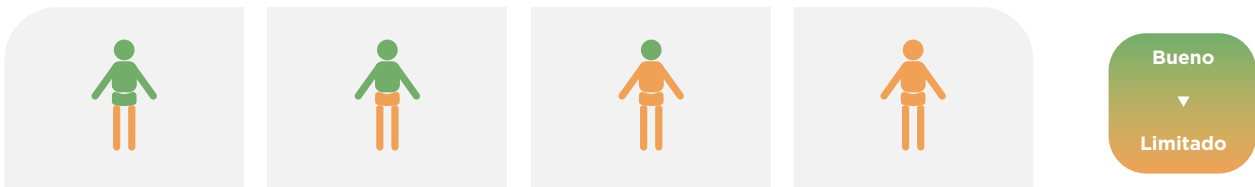


Seleccionar el modelo correcto

El objetivo principal de la selección de eslingas es **brindar la cantidad de apoyo necesaria para el cuerpo del usuario**. Las eslingas de Invacare están diseñadas para dar soporte en aquellas áreas donde disminuye el control corporal y el tono muscular. Las principales partes del cuerpo a evaluar son las piernas, la cadera, el tronco y la cabeza.

La ilustración a continuación ofrece una visión general sobre qué modelo de eslinga es el adecuado según la capacidad física del usuario:

Evaluación del **control corporal** ▼



Control corporal que brinda el modelo de eslinga Invacare ▼

Muy leve ▼	Leve ▼	Intermedio ▼	Completo ▼	Uso previsto
				Universal Standard
				Menos óptimo* Óptimo
			Universal Standard	
			Universal High	
			Universal High Plus	
			Easy-Fit	
			Comfort In Situ	
			Comfort High	
Dress Toileting Low				
Stand Assist				
Transfer Stand Assist				

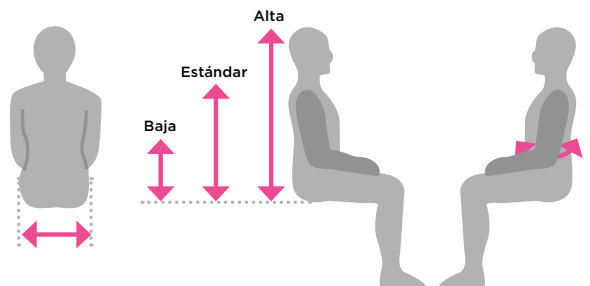
***Menos óptimo**
Es importante considerar que el usuario mantiene ciertas capacidades/habilidades de las que la eslinga le permite usar; por lo tanto quedarán inmovilizados con el tiempo. Adicionalmente, se utiliza más tela de la necesaria, por lo que requiere mayor esfuerzo colocar la eslinga.

Seleccionar la talla correcta

Las medidas más importantes para seleccionar la talla de la eslinga son el ancho de la cadera y el alto de la espalda medida en posición sentado. La circunferencia de la cintura es necesaria para las eslingas con cinturones.

El peso del cliente debe considerarse principalmente para el peso máximo de usuario de la eslinga. A continuación, para indicar el tamaño correcto de la eslinga.

A continuación, en el detalle de cada eslinga, encontrará las medidas por modelo y talla para identificar la selección adecuada.



► Tamaño	XS	S	M	L	XL
► Peso máximo de usuario	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg

Eslingas Invacare para grúas de elevación

Familia Universal

Eslingas versátiles para las rutinas diarias



◀ Universal Standard

- Soporta todo el cuerpo incluido los hombros
- Adecuada para usuarios con control de cabeza
- Puede ser usada para transferencias desde posición acostada, elevaciones desde el suelo y transferencias sentado - sentado



◀ Universal High


- Soporta todo el cuerpo incluida la cabeza
- El usuario estará en una posición ligeramente inclinada
- Adecuada para usuarios con control limitado de cabeza, tronco y caderas
- Puede ser utilizada para transferencias desde posición acostada, elevaciones desde el suelo y transferencias sentado-sentado
- Antes conocida como Eslinga Hamaca



◀ Universal High Plus

- Características similares a la Eslinga Universal High (Hamaca) pero permite a los usuarios mantener los brazos fuera de la eslinga y ser más activo y participativo durante la transferencia.
- Antes conocida como Universal con reposacabezas

	XS	S	M	L	XL	
Universal Standard	A	1000	1085	1180	1240	
	B	915	1050	1095	1240	
	C	510	560	585	590	
	D	410	480	555	720	
Universal High	A	1040	1080	1425	1555	1600
	B	740	845	1000	1120	1190
	C	615	770	900	1000	1000
	D	310	350	375	450	570
Universal High Plus	A	1385	1510	1580	1590	
	B	570	660	740	850	
	C	880	935	970	970	
	D	345	455	565	630	

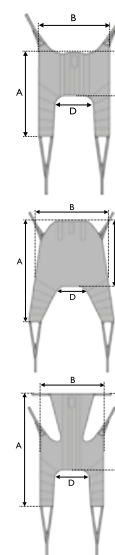

Eslinga con mayor soporte


Para pacientes más pasivos que necesitan más apoyo



◀ Easy-Fit

- Soporta todo el cuerpo y la cabeza
- Adecuado para usuarios con control limitado de la cabeza, tronco y caderas
- Soporte de piernas separadas que facilita su colocación y permite colocarlas en dos posiciones : cruzada o súperpuesta.
- Brinda una buena posición de la cadera que permite al usuario mantener una posición más erguida.
- Antes conocida como Eslinga Fácil Colocación

	S	M	L
A	1130	1200	1270
B	760	800	860
C	630	675	720
D	185	235	245
E	180	190	210
F	150	195	215

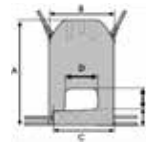

Eslingas con mayor apertura higiénica


Amplia apertura para facilitar la higiene y su colocación



◀ Dress Toileting Low

- Adecuado para usuarios con buen control de cabeza y tronco.
- El cinturón incrementa el soporte alrededor del cuerpo y un posicionamiento seguro
- Se puede utilizar para transferencias sentado - sentado
- Antes conocida como eslinga Higiene

	S	M	L	XL
A	870	950	1020	1100
B	710	800	900	1080
C	200	230	230	270
D	430	495	600	760

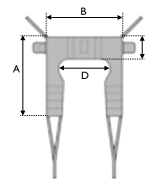

Familia Comfort

Eslingas estilo Hamaca ideal para usuarios con dolor crónico. La eslinga también es útil para amputados por encima de la rodilla. La eslinga Comfort In Situ es la mejor elección cuando la eslinga tiene que permanecer entre el usuario y la superficie después de una transferencia a posición sentado.



◀ Comfort High

- Soporta todo el cuerpo incluida la cabeza
- Adecuado para los usuarios con control limitado de la cabeza, el tronco y la cadera
- Incorporan dos asas adecuadamente posicionadas para facilitar el manejo.
- Antes conocida como eslinga Comfort




◀ Comfort In Situ

NUEVO

- Soporta todo el cuerpo
- Adecuada para aquellos con buen control de cabeza
- Diseñada sin asas para permanecer entre el usuario y la superficie después de la transferencia
- Elaborada con material especialmente certificado como ignífugo en red y spacer
- Respetuosa con el medio ambiente
- Probada por terceros conforme las normas EN1021 partes 1 y 2



	S	M	L	XL	
Comfort Standard & Comfort in Situ	A	960	1020	1160	1170
	B	1050	1170	1290	1330
	C	550	610	675	745
	D	1000	1050	1110	1275
Comfort High	A	1150	1395	1445	1460
	B	1050	1170	1290	1330
	C	550	610	675	745
	D	1020	1160	1280	1470

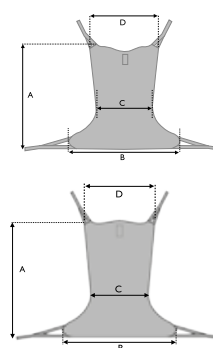

Eslingas Invacare para grúas de bipedestación



◀ Stand Assist

- Adecuada para usuarios con suficiente control corporal pero que no pueden permanecer de pie sin soporte
- El paciente debe poseer equilibrio mental y corporal, control de cabeza y habilidad para sujetar la grúa
- Está extra-acolchada para comodidad adicional
- Material antideslizante en la espalda
- Antes conocida como eslinga Transferencia de Pie




◀ Transfer Stand Assist

- Características similares a la Eslinga Stand Assist pero con soporte adicional de piernas.
- Antes conocida como eslinga Transferencia Sentado

	S	M	L	XL	
Stand Assist	A	260	330	360	360
	B	840	895	950	1020
	C	950	1170	1270	1810
Transfer Stand Assist	D	965	1060	1160	1260

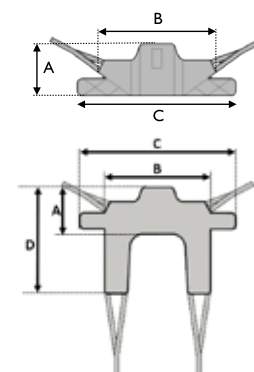Medidas como Stand Assist + "D"



Tallas & Materiales ▼


▼ Familia	▼ Modelo	▼ Tallas					▼ Materiales		
		XS	S	M	L	XL	Tejido	Red	Spacer
Universal	Universal Standard		◆	◆	◆	◆	●	●	
	Universal High	◆	◆	◆	◆	◆			●
	Universal High Plus		◆	◆	◆	◆	●		
Mayor soporte	Easy Fit		◆	◆	◆				●
Apertura higiénica	Dress Toileting Low		◆	◆	◆	◆	●		
Comfort	Comfort High		◆	◆	◆	◆			●
	Comfort In Situ		◆	◆	◆			●	●
Bipedestación	Stand Assist		◆	◆	◆	◆	●		
	Transfer Stand Assist		◆	◆	◆	◆	●		

Materiales ▼



Poliéster - Tejido

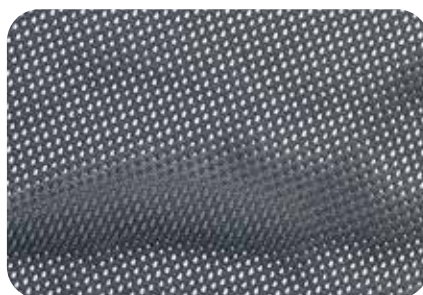▲ Material fuerte, resistente y de fácil aplicación. Se desliza suavemente al ser colocado y se seca rápidamente después del lavado.



Poliéster - Red

▲ También conocida como Red, la opción de red es ideal para entornos húmedos, de ducha o baño. Comparado con los otros materiales tiene mejores propiedades de drenaje y secado rápido.



Spacer

▲ Tejido transpirable y bi-elástico que permite al material adaptarse al contorno corporal del usuario, que brinda mayor comodidad y soporte.

Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es



Peso max. usuario ▼



Temperatura max. lavado ▼



Blanqueadores ▼



Secadora ▼

Eslingas Invacare

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg

90° C

No utilizar blanqueadores

Baja temperatura

Todas las eslingas deben ser probadas y ajustadas al usuario para asegurar comodidad durante las transferencias

Es importante realizar un análisis de riesgo de la piel de las personas que deben permanecer en la eslinga largos períodos de tiempo.

También se debe realizar un análisis de riesgo antes de utilizar eslingas de un fabricante en grúas de uno diferente.

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
46001 Valencia
España



ESLINGAS



- Ajuste óptimo
- Seguridad y confianza mejoradas
- Comodidad óptima
- Fácil aplicación
- 3 materiales diferentes
- Diferentes tallas disponibles
- Temperatura de lavado : 90°
- Peso max. usuario : 200kgr y 250kgr para XL



	Código	Descripción	P.V.O sin IVA		
ESLINGAS PARA GRUAS DE ELEVACION					
Familia Universal					
	60124092	Universal Standard XL - tejido	x1	57,22	
	60124091	Universal Standard L - tejido			
	60124090	Universal Standard M - tejido	x2un. o Montada	44,17	
	60124089	Universal Standard S - tejido			
	60124097	Universal Standard XL - red	x1	57,22	
	60124096	Universal Standard L - red			
	60124095	Universal Standard M - red	x2un. o Montada	44,17	
	60124094	Universal Standard S - red			
		60124072	Universal High XL - spacer (antes conocida como eslinga Hamaca)	x1	116,59
		60124071	Universal High L - spacer (antes conocida como eslinga Hamaca)		
		60124070	Universal High M - spacer (antes conocida como eslinga Hamaca)		
		60124069	Universal High S - spacer (antes conocida como eslinga Hamaca)	x2un. o Montada	82,93
60124068		Universal High XS - spacer (antes conocida como eslinga Hamaca)			
60124107		Universal High Plus XL - tejido (antes conocida : eslinga Universal con Reposacabezas)	x1	98,30	
60124106		Universal High Plus L - tejido (antes conocida : eslinga Universal con Reposacabezas)			
60124105		Universal High Plus M - tejido (antes conocida : eslinga Universal con Reposacabezas)	x2un. o Montada	73,73	
60124104	Universal High Plus S - tejido (antes conocida : eslinga Universal con Reposacabezas)				

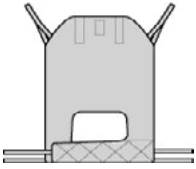
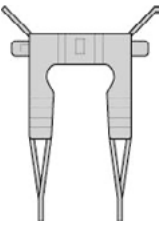
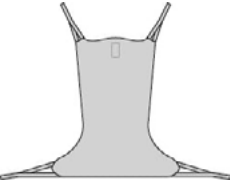








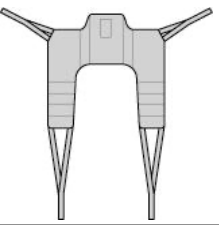
	Código	Descripción	P.V.O sin IVA	
Eslingas con Mayor Soporte				
	60123935	Easy fit L - spacer (antes conocida : Fácil Colocación)	x1	103,69
	60123934	Easy fit M - spacer (antes conocida : Fácil Colocación)		
	60123933	Easy fit S - spacer (antes conocida : Fácil Colocación)	x 2un o Montada	82,94
Eslingas con Mayor Apertura Higiénica				
	60123893	Dress toileting Low XL - tejido (antes conocida : Eslinga Higiene)	x1	116,59
	60123892	Dress toileting Low L - tejido (antes conocida : Eslinga Higiene)		
	60123891	Dress toileting Low M - tejido (antes conocida : Eslinga Higiene)	x 2un o Montada	82,93
	60123890	Dress toileting Low S - tejido (antes conocida : Eslinga Higiene)		
Familia Comfort				
	60123764	Comfort In Situ XL - spacer NUEVO 	x1	105,00
	60121087	Comfort In Situ L - spacer 		
	60121086	Comfort In Situ M - spacer 	x 2un o Montada	84,00
	60121085	Comfort In Situ S - spacer 		
	60123778	Comfort In Situ L - red NUEVO 	x1	105,00
	60123777	Comfort In Situ M - red 		
	60123776	Comfort In Situ S - red 	x 2un o Montada	84,00
	60123869	Comfort High XL - spacer (antes : Eslinga Comfort)	x1	79,81
	60123868	Comfort High L - spacer (antes : Eslinga Comfort)		
	60123867	Comfort High M - spacer (antes : Eslinga Comfort)	x2un o Montada	58,00
	60123866	Comfort High S - spacer (antes : Eslinga Comfort)		
	ESLINGAS PARA GRUAS DE BIPEDESTACION			
	60123944	Stand assist XL - tejido (antes : Eslinga de Transferencia de Pie)	x1	118,13
	60123943	Stand assist L - tejido (antes : Eslinga de Transferencia de Pie)		
	60123942	Stand assist M - tejido (antes : Eslinga de Transferencia de Pie)	x 2un o Montada	94,50
	60123941	Stand assist S - tejido (antes : Eslinga de Transferencia de Pie)		
	60123948	Transfer Stand Assist XL - tejido (antes : Eslinga de Transferencia Sentado)	x1	123,75
	60123947	Transfer Stand Assist L - tejido (antes : Eslinga de Transferencia Sentado)		
	60123946	Transfer Stand Assist M - tejido (antes : Eslinga de Transferencia Sentado)	x 2un o Montada	99,00
	60123945	Transfer Stand Assist S - tejido (antes : Eslinga de Transferencia Sentado)		

Tabla de correspondencia de códigos

Código anterior	Descripción	Nuevo código	Descripción
-	NUEVO	60124097	Universal Standard, Red XL
-		60124096	Universal Standard, Red L
-		60124095	Universal Standard, Red M
-		60124094	Universal Standard, Red S
I485885	Universal Estándar XL	60124092	Universal Standard, Tejido XL
I485884	Universal Estándar L	60124091	Universal Standard, Tejido L
I485883	Universal Estándar M	60124090	Universal Standard, Tejido M
I485882	Universal Estándar S	60124089	Universal Standard, Tejido S
I485959	Universal Hamaca XL	60124072	Universal High, Spacer XL
I485958	Universal Hamaca L	60124071	Universal High, Spacer L
I485957	Universal Hamaca M	60124070	Universal High, Spacer M
I485956	Universal Hamaca S	60124069	Universal High, Spacer S
I485955	Universal Hamaca XS	60124068	Universal High, Spacer XS
I485963	Universal con reposacabeza XL	60124107	Universal High Plus, Tejido XL
I485962	Universal con reposacabeza L	60124106	Universal High Plus, Tejido L
I485961	Universal con reposacabeza M	60124105	Universal High Plus, Tejido M
I485960	Universal con reposacabeza S	60124104	Universal High Plus, Tejido S
I451090	Confort XL	60123869	Comfort High, Spacer XL
I485778	Confort L	60123868	Comfort High, Spacer L
I485777	Confort M	60123867	Comfort High, Spacer M
I485554	Confort S	60123866	Comfort High, Spacer S
-	NUEVO	60123778	Comfort In Situ, Red L
-		60123777	Comfort In Situ, Red M
-		60123776	Comfort In Situ, Red S
-	NUEVO	60123764	Comfort In Situ, Spacer XL
-		60121087	Comfort In Situ, Spacer L
-		60121086	Comfort In Situ, Spacer M
-		60121085	Comfort In Situ, Spacer S
I478443	Higiene XL	60123893	Dress Toileting Low, Tejido XL
I478442	Higiene L	60123892	Dress Toileting Low, Tejido L
I478441	Higiene M	60123891	Dress Toileting Low, Tejido M
I478440	Higiene S	60123890	Dress Toileting Low, Tejido S
I451109	Fácil Colocación L	60123935	Easy Fit, Spacer L
I451108	Fácil Colocación M	60123934	Easy Fit, Spacer M
I451107	Fácil Colocación S	60123933	Easy Fit, Spacer S
I484688	De transferencia de pie XL	60123944	Stand Assist, Tejido XL
I484687	De transferencia de pie L	60123943	Stand Assist, Tejido L
I484686	De transferencia de pie M	60123942	Stand Assist, Tejido M
I484685	De transferencia de pie S	60123941	Stand Assist, Tejido S
I485117	De transferencia sentado XL	60123948	Transfer Stand Assist, Tejido XL
I484691	De transferencia sentado L	60123947	Transfer Stand Assist, Tejido L
I484690	De transferencia sentado M	60123946	Transfer Stand Assist, Tejido M
I484689	De transferencia sentado S	60123945	Transfer Stand Assist, Tejido S