

ELEVADOR HIDRÁULICO FIJO

VER
video

VER
IMÁGENES
DE
MONTAJE

mod. **METALU B-2**



VENTAJAS de Metalu B-2:

La barandilla y sus cinco puntos de apoyo, lo hacen el elevador más seguro del mercado.

Es el modelo tradicional.

Se deja fijo durante toda la temporada de baño y lo pueden quitar para guardarlo en invierno.

METALU B-2



Asiento desmontable


Características generales del elevador hidráulico fijo Metalu B-2.

- Homologados para elevar 150 o 120 Kgs.
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
- Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
- Radio de giro 700 m/m.
- El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario.
- El asiento tiene un recorrido de 1,06 mts. y es graduable en altura, normalmente se coloca a +0,53 mts. y -0,53 mts. sobre el nivel del agua.
- Se adapta a cualquier piscina por que todas las cogidas son graduables.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
- Usuario Autónomo.


- * Peso neto50 Kg
- * Peso embalado.....62 kg
- *Tiempo de subida en vacío.....20 "
- *Tiempo de subida con 85 kg de carga.....25 "
- *Tiempo de bajada en vacío.....42 "
- * Tiempo de bajada con 85 kg de carga.....20 "
- * Capacidad de agua en el pistón8 litros




Alzado Lateral

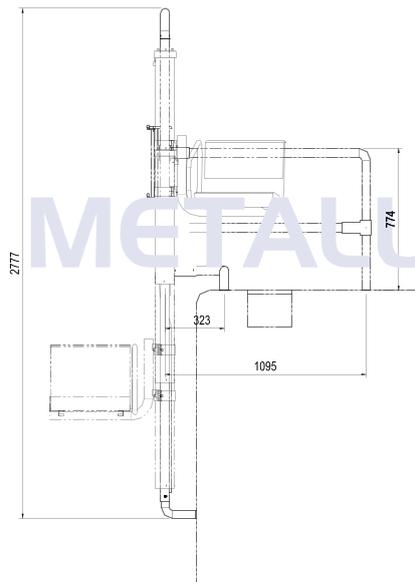

Alzado frontal

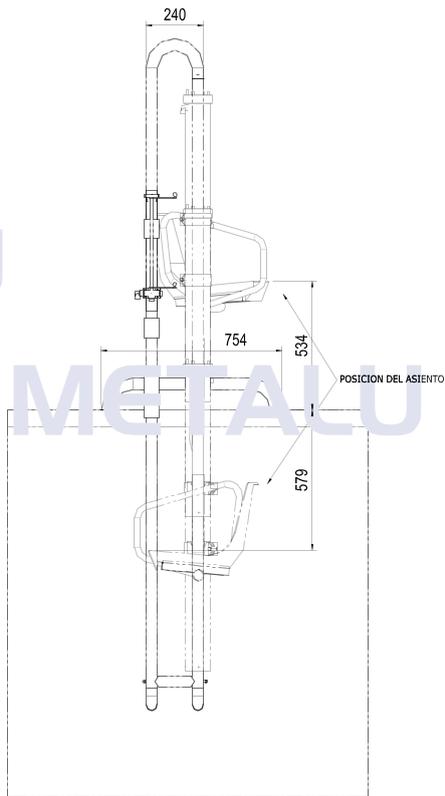

Planta Superior

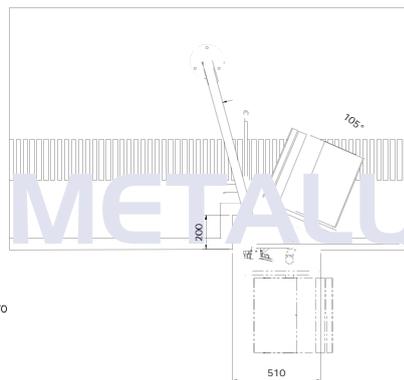

1 MTS MINIMO

Características Comunes para elevadores hidráulicos Metalu-B2 y Metalu-Pk.

- No contiene materias grasas, electricidad ni elementos contaminantes.
- Fabricados con perfiles estructurales en acero inoxidable AISI 316.
- Estructura tubular SCH 10 48 x 2 m/m.
- Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina.
- Homologación, Declaración de conformidad del mercado CE.
- Muy fácil de instalar y de guardar.
- Asiento de PVC desmontable.
- Dos años de garantía.



METALU P-K

METALU B-2

Preinstalación e Instalación:

Al elegir el sitio de ubicación hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- Que sea fácil de acceder por el usuario.
- Que no esté en lugar de tránsito o estacionamiento por otros bañistas.
- Que la toma de agua se encuentre lo más cerca/cómoda posible.
- Aconsejamos poner el elevador donde el agua tenga una profundidad de 1,20/1,30 Mts aprox. al objeto de si el usuario del elevador necesita ayuda, la persona que lo acompañe este segura haciendo pié.
- En el lugar donde se ha decidido colocar el elevador, hay que dejar una toma de agua de 1/2 pulgada y 3.5 bar. Si la red no tuviera dicha presión habría que colocar un grupo de presión.
- Si la piscina ya esta construida, aconsejamos poner la toma de agua después de colocar el elevador.
- Instalación es bien sencilla.
- Sólo lleva anclajes en el exterior del vaso.
- Graduar la altura del asiento y conectar la manguera a la toma de agua.

Complementos METALU



Cinturón de seguridad para posicionar en paralelo o en cruz



Reposa cabezas



Funda protectora, fabricada con tejido Foswri (impermeable) ajustada al elevador, con cremallera continua en la parte trasera y ajuste en la base. Modelos METALU 400 Y 600.

Consejos para un mejor uso y mantenimiento de los ascensores

- Periódicamente se debe limpiar el elevador, como se limpia la grifería de las casas. Si la suciedad esta muy incrustada utilizar gel Viakal, o similar, y scotch-brite de vitro cerámica. De esta forma **METALU** estará siempre como el primer día.
- Tenga presente que en el agua hay cloro, cal y suciedad, el agua se evapora quedando la suciedad sobre la superficie de **METALU**.
- Si el elevador no es utilizado, periódicamente se debe hacer funcionar con carga haciéndolo subir y bajar varias veces.
- Al terminar la temporada se debe guardar el elevador en un sitio donde no reciba golpes o daños, dejando el pistón vacío (en la parte baja) y secándolo con un paño.
- En zonas de riesgos de heladas durante el invierno es **imprescindible** vaciar las mangueras y el pistón de agua.
- Para el funcionamiento del elevador utilizar agua limpia, si se utiliza agua de pozo u otro sitio que pueda contener impurezas utilizar filtros.
- Si se utiliza el sistema de **ELECTROLISIS** como tratamiento del agua, aconsejamos conectar el elevador a una toma de tierra.
- Al empezar la temporada se debe de pulgar la manguera de la toma agua.

Piscinas Cubiertas.

- Si el elevador es utilizado en una piscina cubierta la limpieza es primordial.
- Comparadas con las piscinas al aire libre, además de temperaturas mas altas de agua y aire, suelen acusar menores niveles de renovación de estos elementos y, con frecuencia, una mayor intensidad de uso. Todo ello se traduce en una mayor carga de bañistas, mayor contaminación orgánica y, en consecuencia, mayores dosis de productos desinfectantes.
- Estos productos contienen partículas volátiles que se condensan el aire, poco ventilado, adhiriéndose a las superficies metálicas. Por lo que se recomienda que se limpie el elevador a menudo enjuagándolo con agua no salina, sin cloro (agua de la red).



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Todos nuestros elevadores tienen una placa identificativa con el año de fabricación y el número de serie, porque así lo exige la normativa.

Este número se indica en la garantía



Desconfíe de los productos que no tengan placa de identificación indicando los datos del fabricante, año de fabricación y número de serie.